

FAQs

¿Qué ocurre si no puedo completar 90 minutos consecutivos?

Aunque recomendamos encarecidamente sentarse durante los 90 minutos completos, si experimenta molestias al sentarse durante tanto tiempo o necesita ir al baño, puede dividir el tratamiento en dos sesiones en el mismo día. Si cree que no podrá realizar los 90 minutos completos seguidos comuníquese con su representante de AOTI.

¿Qué ocurre si me salto un tratamiento?

Consulte en su receta el número mínimo de tratamientos que debe realizar cada semana. Si se salta varios tratamientos en la misma semana, puede hacer dos tratamientos en un día.

¿Y si quiero tratamientos más frecuentes?

Si quiere realizar más tratamientos a la semana, puede hacerlo. No se puede tener una sobredosis de la oxigenoterapia. No obstante, le recomendamos que mantenga un buen equilibrio en sus actividades diarias para no agotarse.

¿Puedo reutilizar las botas?

No, las botas son de un solo uso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta algún problema al iniciar la terapia o tiene alguna pregunta o duda, llame primero a su representante de AOTI para obtener ayuda. Si no puede ponerse en contacto con su representante de AOTI, llame al servicio de atención al cliente al 1-866-432-5896.



**¿DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
VISITE AOTINC.NET O ESCANEE AQUÍ**



Si tiene preguntas o dudas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al **1-866-432-5896**.

3512 Seagate Way, Suite 100
Oceanside, CA 92056, Estados Unidos

ADJUNTAR TARJETA DE VISITA AQUÍ



Guía de Configuración del Paciente

Tratamiento eficaz de heridas en casa

two₂
MULTI-MODALITY OXYGEN

Bienvenido

Estamos encantados de que usted y su médico hayan elegido la Terapia de Oxígeno Tópico (TWO₂), una terapia probada clínicamente para el tratamiento de heridas crónicas y difíciles de curar. Como sus asistentes en el cuidado, estamos decididos a ofrecerle un tratamiento de la mejor calidad y a ayudarle a vivir mejor su vida.

La terapia TWO₂ es una opción de terapia segura y no invasiva que puede utilizarse en la comodidad de su propio hogar. Todas las heridas necesitan oxígeno para cicatrizar. Las heridas crónicas pueden volverse hipóxicas o bajas en oxígeno. La cámara para extremidades (o "bota") suministra el oxígeno necesario a la herida. Mientras se administra el oxígeno, la compresión cíclica sin contacto de la bota mejora el flujo sanguíneo para ayudar a reducir la inflamación (edema). Por último, la humidificación opcional garantiza un nivel de humedad ideal que ayuda al proceso de cicatrización.

Al empezar

- Antes de comenzar la terapia, debe ir al baño, comer o tomar un bocadillo y reunir todo lo que desee tener cerca durante la terapia, como el control de la televisión, un libro, el teléfono y un vaso de agua.
- Deberá permanecer sentado o acostado durante la duración de la terapia (90 minutos a menos que su médico le haya prescrito otra cosa).
- **NO SE PUEDE FUMAR** durante la terapia ya que el oxígeno presenta riesgo de incendio cuando está cerca de una llama encendida. Asegúrese de que no haya chimeneas ni velas encendidas en la habitación en la que se encuentre. Durante el tratamiento nunca utilice ninguna llama encendida de ningún tipo.
- Puede dejarse puestos los vendajes, a menos que su médico le haya indicado lo contrario. La terapia también funciona sobre un yeso de contacto completo (TCC).
- No debe sentir ningún dolor durante la terapia. Si siente dolor, es importante que se ponga en contacto con su médico inmediatamente.

PELIGRO



NO FUMAR O USAR FUEGO EN PRESENCIA DE OXYGENO.



COMPONENTES


Concentrador de oxígeno



Controlador



Cámara para extremidades ("Bota")

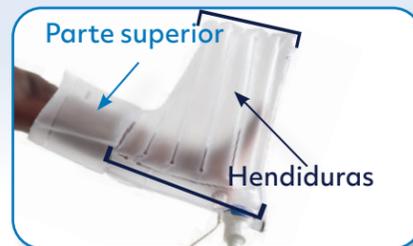

Cable eléctrico



Línea de oxígeno (verde)



Manguera Interfaz (azul)



Humidificador y Ampolla de agua estéril



Enchufe del humidificador



Cable del humidificador (beige)

I. PREPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Su representante se asegurará de que el cable de alimentación, la línea de oxígeno verde, la manguera de interfaz azul y el cable del humidificador estén correctamente conectados al controlador.

1 Asegúrese de que tanto el concentrador como el controlador están enchufados a la corriente.

2 **Si utiliza humidificación:** Conecte el humidificador al cable del humidificador, gire la parte superior de la ampolla azul de agua estéril y vuelque el agua en el recipiente. Inserte el enchufe del humidificador en el humidificador. Inserte el humidificador en la bota mirando hacia la punta de la bota.



Si **NO** está utilizando humidificación, conecte la parte superior del humidificador con el tapón del humidificador e inserte el humidificador en la bota mirando hacia el extremo de la punta de la bota.

3 Localice el punto de conexión de la manguera en la bota. Conecte la manguera de interfaz azul en la bota en el punto de conexión apuntando el botón azul grande directamente hacia el extremo de la punta de la bota y alineando las flechas/triángulos. Excuchará un clic.



4 Introduzca la pierna a tratar dentro de la bota y tire de la bota hacia arriba hasta que el pie esté lo más adentro posible de la bota. La parte superior de la bota debe estar en contacto con la piel y libre de vendajes o ropa.




Nota: Hay dos tamaños de botas. La parte superior de la bota grande debe ajustarse alrededor del muslo. La parte superior de la bota mediana debe quedar justo por debajo de la rodilla.

II. INICIO DE LA TERAPIA

5 Pulse el botón **ENCENDIDO** para encender el concentrador.
Pulse el botón **ON** del controlador.




6 La pantalla del controlador le indicará que **INFLATE BAG (INFLAR BOLSA)**
Pulse el botón para **SÍ**.
Se inflarán las hendiduras de la bota.

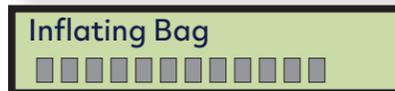

7 La pantalla le indicará **INFLATE CUFF (inflar parte superior de la bota)**.
Pulse el botón para **SÍ**.
Sentirá presión en la parte superior, lo cual es normal.




8 La pantalla le indicará **START THERAPY (INICIAR TERAPIA)**.
Pulse el botón para **SÍ**.
Se iniciará la TERAPIA, y se mostrarán la presión y el tiempo. Una sesión de terapia típica dura 90 minutos. En 1-2 minutos, el número P empezará a oscilar entre 50* mbar y 10 mbar durante la duración de la terapia. (Si no lo hace, llame a su representante). El número T indica el número de minutos restantes de la sesión de terapia.

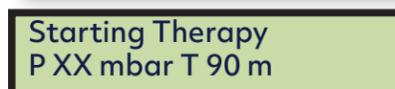

*a menos que su médico haya prescrito lo contrario

III. FINALIZACIÓN DE LA TERAPIA

9 **Sonará la alarma de TERAPIA FINALIZADA** y parpadeará una luz.
Pulse el botón **ON/OFF** para apagar el controlador.

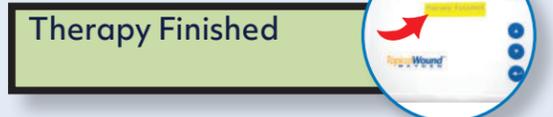

10 Abra el tapón de la parte superior de la bota para desinflarla y, a continuación, retire la bota.



11 Desconecte la manguera de interfaz azul y **GUARDE** el humidificador y el enchufe del humidificador para volver a utilizarlos en la siguiente bota.



12 Deseche la bota.

¡PELIGRO!
La bota es de un solo uso. **NO** la reutilice, reprocese ni desinfecte. Deséchela después de usarla.