

Parche Múltiple

Guía de Configuración


El poder curativo de
TWO² en una forma flexible



PREPARACION Y CONFIGURACION **No se permite fumar ni tener llamas encendidas!**

Después de que su representante de AOTI haya configurado el equipo necesario para usar con esta terapia.

LO QUE VAS NECESITAR: 1 PARCHE

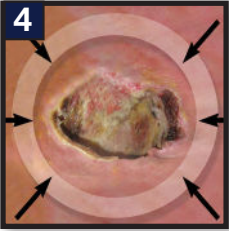- 1** Asegúrese de que el concentrador este enchufado a una fuente de electricidad.
- 2** Llene el humidificador con agua destilada hasta la línea entre cada uso. Use únicamente agua destilada. Coloque el humidificador en su posición y verifique que todas las conexiones estén seguras y que tengan un buen sellado.
- 3** Si algún vendaje o pomada no es permeable a los gases, (como Santyl/Silvadene; Collagenase) sería necesario retirarlo y limpiar el área según lo ordenado por el proveedor de atención médica (realizado por el cuidador). Es posible que sea necesario aplicar un nuevo vendaje o pomada después de que haya completado la oxígeno terapia.
- 4** Por protección, donde se va a colocar el Multi-Parche directamente sobre la piel, use toallitas de preparación para la piel y déjela secar. El Multi-Parche se puede colocar sobre vendajes permeables al gas.
- 5** Abrir un nuevo Multi-Parche. Para que las heridas encajen cómodamente en la apertura, retire la cantidad requerida de anillos o corte el área del anillo adhesivo a la forma requerida. **NO** es necesario centrar la herida. Retire el papel protector de los anillos adhesivos restantes y coloque el Multi-Parche sobre el área de tratamiento deseada.
- 6** Conecte el tubo de oxígeno al puerto de salida de la botella humidificadora.

INICIAR TERAPIA

- 7** Conecte los accesorios al parche y escuche un **CLIC** (guarde el tubo adicional en un lugar seguro). Asegúrese de que los accesorios no estén debajo de ninguna parte del cuerpo para evitar lesiones en la piel.



- 8** Encienda el concentrador y suba la perilla de flujo hasta que el Multi-Parche se acople suavemente (generalmente entre 3 y 4 litros por minuto) y no se separe de la piel. Cuando se coloca el Multi-Parche sobre los vendajes, habrá más fugas y se necesitará un flujo mayor. No exceda los 5 LPM o 10 LPM dependiendo del tamaño del concentrador que se utilice.



- 9** Asegúrese de que el parche se adhiera a la piel. Si el parche se infla entonces el tratamiento está funcionando.

El cinturón de espuma se puede utilizar para ayudar a mantener el Multi-Parche en su lugar de forma segura y también para proporcionar una mejor adhesión sobre los vendajes.




TERMINAR LA TERAPIA

TERAPIA CRONOMETRADA

- 10** Después de 60 a 90 minutos de terapia, apague el concentrador de oxígeno y desconecte los tubos del parche. Retire lentamente el parche para no rasgar la piel. Deseche el parche usado adecuadamente.

Si se quitó el vendaje antes de la terapia, pídale a su cuidador que aplique un vendaje nuevo según lo indicado por el proveedor de atención médica.

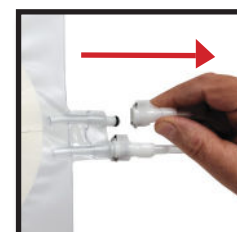

Guarde el tubo para el próximo uso. **"NO LO DESECHE"**.



RECORDATORIO!

El Multi-Parche es de un solo uso. Deseche después de cada terapia. No reutilizar, reprocesar ni desinfectar.

Para obtener un manual completo e información de seguridad importante, consulte las **INSTRUCCIONES DE USO** que se proporciona con el sistema de terapia multimodal **TWO2**. Para obtener más información sobre el producto, póngase en contacto con un representante médico de **TWO2**. Si tiene preguntas médicas, comuníquese con su médico, enfermera o cuidador. Todas las marcas comerciales designadas en este documento son propiedad de AOTI.

Contacto AOTI: _____

Teléfono: _____ Email: _____



AOTI

3512 Seagate Way, Suite 100
Oceanside, CA 92056, USA
P: 1-760-431-4700 • F: 1-760-683-3063

Mire el video de configuración
rápida de **TWO2** el Multi-Parche



MKT-043 Rev. A